

右クリックアダプタ使用説明書

概要


右クリックアダプタは接続したスイッチを操作してマウスの右クリックを行う装置です。クチマウスなど右クリック機能のないマウスといっしょに使用します。




接続方法

➤ WindowsXp、2000、Me の場合

1. 右クリックアダプタの「スイッチ」ジャックに操作用スイッチを接続してください。
2. Windows が完全に起動したら右クリックアダプタのコードをコンピュータの USB ポートにさしこんでください。[最初の1回だけはコンピュータ起動後にさしこみます]
3. 「新しいハードウェアが見つかりました」という表示が現れます。

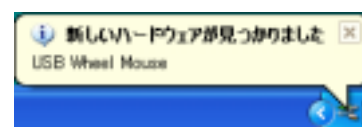


4. 表示は自動的に数回切り替わります。「新しいハードウェアがインストールされ、使用準備ができました。」と表示されれば接続完了です。

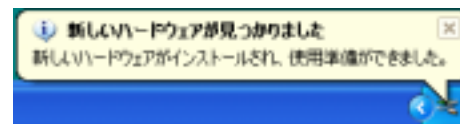

➤ Windows98 の場合

1. 右クリックアダプタの「スイッチ」ジャックに操作用スイッチを接続してください。
2. Windows が完全に起動したら右クリックアダプタのコードをコンピュータの USB ポートにさしこんでください。[最初の1回だけはコンピュータ起動後にさしこみます]
3. 「新しいハードウェアが見つかりました」という表示が現れます。
4. 右のような画面が現れたら「次へ」をクリックしてください。

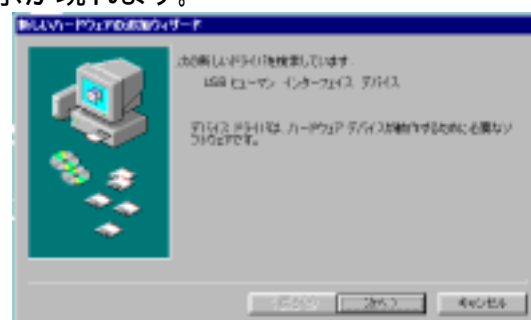

5. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」にチェック(印)を入れ「次へ」をクリックしてください。



6. 「次へ」をクリックしてください。

7. 「次へ」をクリックしてください。

8. 右のような画面が現れたら「OK」をクリックしてください。

9. 右のような画面が現れたら「ファイルのコピー元」に「C:\WINDOWS\OPTIONS\CABS」と入力し「OK」をクリックしてください。

10. 「完了」をクリックし接続完了です。



使用方法

操作スイッチを押すと右クリックが行われます。

確認方法:画面の何も無いところ(デスクトップ)で操作スイッチを押すと右クリックメニューが現れます。(右クリックメニューはメニューの外で左クリックを行うと消えます。)



右クリック用スイッチ

- クチマウスへの取り付け
 - ◇ スイッチの「ベロ」をクチマウスの円柱にテープやゴムで取り付けてください。
 - ◇ 「ベロ」は曲げることができ、角度や位置の調整ができます。
 - ◇
- 「ベロ」の取りはずし
 - ◇ 「ベロ」を使用しない場合、じゃまな場合は取り外せます。(再利用はできません)
 - リングを回してゆるめます
 - ゴムをカッターなどで切り、取り去ります
 - 縛ってあるひもを切ります
 - 針金を曲げ広げて取り外します

