

◆ 概要

- 簡易ECS(環境制御装置)はひとつのスイッチで家電製品のリモコン操作、呼び出し(ナースコール)操作、パソコン操作を行う装置です。
- 合計100の操作チャンネルがあり、表示器に数字で表示されます。
- チャンネル01はナースコール用チャンネルです。
- チャンネル02、03はパソコン操作用チャンネルで、ワンキー・マウスなど1スイッチで操作する入力補助装置の操作に使用します。
- チャンネル00と04から98まではリモコン操作用チャンネルです。(チャンネル99は設定用)
- 家電製品付属のリモコンから学習(登録)を行うことで、付属リモコンと同じ操作ができます。



◆ 操作方法

- オートスキャン操作とシフト操作2つの操作方法があります。

➤ オートスキャン

- 操作スイッチを短く押すと、1秒ごとにいちばん下の桁の数字が0, 1, 2...と増えてゆきます。
- 希望の数字の時に操作スイッチを押すと、表示されているチャンネルの操作が行われます。
- 下の桁の表示が「-」の時に操作スイッチを押すと、上の桁の数字が変化ようになります。

➤ シフト

- 操作スイッチを短く押すと、下の桁の数字が1だけ増えます。
- スイッチを押すごとに下の桁の数字が0, 1, 2...と増えてゆきます。
- 希望の数字の時に操作スイッチを長く押すと、表示されているチャンネルの操作が行われます。

➤ ナースコール

- チャンネル01の操作を行うとナースコールがオンになります。
- 他のチャンネルを選択した状態で操作スイッチを約5秒間オンのままにすると、そのチャンネルに留まったままでナースコールがオンになります。
- 停電時は操作スイッチがナースコール出力と直結となり、そのままナースコールに伝わります。

➤ パソコン操作

- チャンネル02または03の操作を行うと「Pc」と表示が変わり、以降スイッチ操作はそのままパソコン入力補助装置へ出力されてパソコン操作が行えるようになります。
- パソコン操作中スイッチを約3秒間オンのままにするとチャンネル選択動作に戻ります。

◆ 仕様

- ナースコール出力: 3.5mmミニジャック、出力: リレー接点(無電圧、極性なし、定格DC24V1A)
- PC1/PC2出力: 3.5mmミニジャック、出力: フォトカプラ(無電圧、極性なし、定格DC30V0.1A)
- スイッチ入力: 3.5mmミニジャック、入力: 極性あり、定格5V1mA
- 電源: ACアダプタ(付属品、DC5V1A)
- 大きさ: 幅60mm、高さ24mm、奥行き120mm(突起部含まず)
- 付属品: 表示器、ACアダプタ、接続コード2本、取扱説明書
- 他に必要なもの: 操作スイッチ(3.5mmミニプラグ付きのもの)