

イヤホン・マイクアダプタ説明書

Rev.1

イヤホン・マイクアダプタはハンズフリー装置を携帯電話のイヤホン・マイク端子に接続するためのアダプタです。平型ジャックの携帯電話に対応しています。

◆ 各部の名称



◆ 接続

1. 平型プラグを携帯電話のイヤホンマイクジャックに差し込みます。
2. 「イヤホン・マイク」ジャックに「ユビキチャット」などハンズフリー装置を接続します。
3. 「スイッチ」ジャックに呼出スイッチまたは「USB 出力アダプタ」を接続します。

◆ 使い方

1. 「スイッチ」ジャックに呼出スイッチを接続した場合、呼出スイッチを1～3秒長押しすると、電話機に登録された番号へ電話をかけることができます。(発信先番号の登録方法は電話機によって異なります。電話機の取扱説明書をご覧ください)
2. 相手の声はハンズフリー装置のスピーカから聞こえます。
3. こちらの声はハンズフリー装置のマイクから送られます。
4. 電話がかかってきた場合、呼出スイッチを1～3秒長押しすると、電話に出ることができます。
5. 発信、着信いずれの場合も相手が電話を切ると自動的にこちら側も切れます。
6. 「スイッチ」ジャックと「USB 出力アダプタ」を接続した場合、パソコン操作で上記1から5の操作ができます。