## iOS/iPadOS ボタン設定

Ver.1

- iOS / iPadOS の Assistive Touch メニューをワンキー・マウスで操作するための設定です。
- 一例として、スイッチ長押し1回でシングルタップ、3回でメニューを開く、4回でホームへ戻る操作に 設定する方法を紹介します。

-			
1.	ワンキー・マウスを接続した状態で、「設定」-「アクセシビリティ」- 「タッチ」-「AssistiveTouch」を選択し、「デバイス」をタップします。		
			7/12
			マウスキー >
2.	Bluetooth 版の場合は「OkMouse-xxxx」を、USB 版の場合は 「OneKeyMouse Torino」を選択します。		く戻る デバイス ののから装置 OKMonise-dER1 )
			OneKeyMouse Torino
			Bluetoothデバイス > ジョイスティックヤマウスなど、Bluetoothあよび
2	「追加のボタンをカフタフィブ」」をないプレキオ		SBANDO Stand Sta
з.	「追加の小ダンをガスダマイス…」をダウノします。	<	追加のボタンをカスタマイズ
			ボタンをカスタマイズするには、AssistiveTouchを 有効にする必要があります。
4.	iOS / iPadOS ではマウスの左ボタンがボタン1、右ボタンがボタン2、 スクロールボタン(中ボタン)がボタン3として扱われます。 「ボタンをカスタマイズ」と表示されたら、以下の操作を行います。 ボタン1の設定を行うときは左クリック操作(長押し1回) ボタン2の設定を行うときは右クリック操作(長押し3回) ボタン3の設定を行うときはスクロールボタン操作(長押し4回)		追加のボタンをカスタマイズ ボタンをカスタマイズするには、AssistiveTouchを 有効にする必要があります。 ボタンをカスタマイズ ボックティングデバイスのボタンを押し て、アクションを追加します。 キャンセル
5.	メニューが表示されるので希望の操作を選択してください。 ボタン1には「シングルタップ」をおすすめします。 選択後「<戻る」を タップします。		
			3D Touch
6.	ボタン1にシングルタップが設定されたことを確認してください。 ボタン2、3の設定を行う場合は、「追加のボタンをカスタマイズ…」を タップし、上記3、4、5を繰り返して各ボタンの操作内容を選択します。		く デバイス OkMouse-4FB1 編集 追加のボタンをカスタマイズ
			<b>ボタン1</b> シハンゲルカップ ト
			ボタンをカスタマイズするには、AssistiveTouchを 有効にする必要があります。
7.	設定後スイッチ長押し3回でメニューが開くか、長押し4回でホームへ 戻るか確認してください。		くデバイス OkMouse-4FB1 編集
			追加のボタンをカスタマイズ
			<b>ボタン1</b> シングルタップ >
			ポタン2 メニューを開く >
			ボタン3 ホーム >
1			