

## マイクスイッチ使用説明書

### 概要

- マイクスイッチはマイクに音を入れて操作するスイッチです。
- 声だけでなく、舌を鳴らしたりマイクに触れることにより操作することもできます。
- 一定時間内に一定回数音を出さないとう動作しないようにして、誤動作を防ぐことができます。

### 各部の名称と機能



### ご使用前に

- マイクジャックにマイクを接続してください。
- 出力ジャックとナースコールの間を 3.5mm ミニプラグコードで接続してください。
- ACアダプタをACアダプタジャックに接続してください。

### 感度調整

- 舌鼓など音をマイクに入れた時に入力ランプが点灯するよう感度調整つまみを調節して下さい。
- 右(時計回り)に回すと感度が上がります。
- 感度を上げすぎると衣擦れの音などで誤動作しやすくなります。



## 使い方

1. 声を出したり、舌鼓を打ったり、マイクに直接触れるなどして音を出します。
2. 音量が一定以上になると入力ランプが点灯します。
3. すぐに出力ランプが緑色に点灯し入力待ち状態であることを示します。
4. 入力ランプは音が無くなると消灯しますが、出力ランプは一定時間緑色で点灯し続けます。
5. 出力ランプが緑色で点灯中に次の音を出すと入力ランプが点灯し、出力ランプの緑色点灯時間は引き延ばされます。
6. 出力ランプの緑色点灯中に設定した回数音を出すと、出力がオンとなります。このとき出力ランプが赤く点灯します。
7. 出力は約1.5秒間オンとなり、その後待機状態に戻ります。

## 設定

### 1. 間隔設定

音を出す間隔を設定します。

出力ランプの緑色点灯(入力待ち)時間が変わり、点灯中に次の音を出せば回数として数えられ設定回数に達すると出力がオンになります。

小さいドライバーでつまみを回します。

右に回すと時間が長くなります。(最大4.8秒)

### 2. 回数設定

続けて何回音を出したときに出力をオンにするか設定します。

出力ランプの緑色点灯(入力待ち)中に設定した回数音を出せば出力がオンになります。

小さいドライバーでダイヤルを回します。

設定は1から4の範囲内で行って下さい。

1に設定した場合は音を出すとすぐに出力がオンになります。