

ワンキーマウス操作ガイド

概要



ワンキーマウスは操作のすべてを1つのスイッチで行うことができるマウスです。
Windows、MacOS 両方で使えます。

接続

- 「スイッチ」ジャックに操作スイッチを接続します。
- コンピュータが起動した状態で USB ポートにワンキーマウスを接続します。
- “新しいハードウェアの追加ウィザード”などが表示された場合画面の指示に従ってください。


カーソル操作

- スイッチを短く押すとマウスカーソルが動きだします。
- 長く押すとカーソルは止まります。
- カーソルが動いている時にスイッチを短く押すと、移動方向が直角に変わります。
- 移動方向はスイッチを押すごとに右 - 下 - 左 - 上 右...と変わってゆきます。
- カーソルが希望の位置に来たらスイッチを長く押しカーソルを止めます。

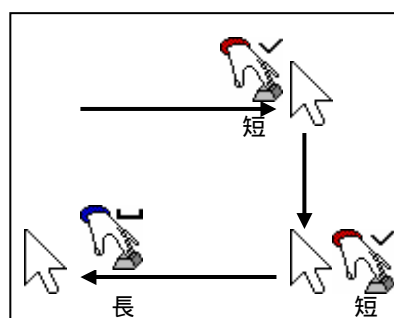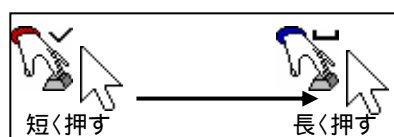

クリック操作

- スイッチを長く押すとクリック操作になります。
- 2回続けるとダブルクリックになります。
- 3回続けると右クリックになります。
- スイッチを長く1回押してクリック操作をした後続けてスイッチを短く押すと、左ボタンを押したままのカーソル移動(ドラッグ)を行えます。
- スイッチを長く押しカーソル移動を止めると、ドラッグ動作も終了します。

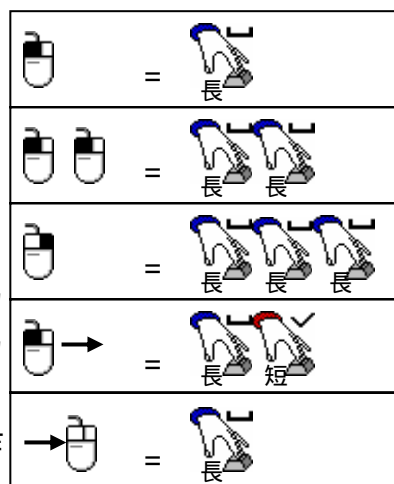

その他

- スピード、移動方向、操作方法などの設定を自分自身で変更することができます。
- 付属ディスク内の取扱説明書に設定変更の方法や便利な機能が載っています。