

ワンキーマウス ナースコール機能説明書 [長押しタイプ] Rev. 3.2

- ◆ ナースコール付きワンキーマウスのナースコール機能について説明します。
- ◆ 通常仕様部分は「ワンキーマウス操作ガイド」および CD-ROM 内の「ワンキーマウス取扱説明」をご覧ください。



◆ 各部の名称と機能

● 前面



コールランプ

ナースコール時点灯します

橙: ナースコールオン / 緑: ナースコール待機

スイッチジャック

操作スイッチを接続します

マウス操作とナースコール兼用です

● 背面



ナースコール出力

ナースコールに
接続します

ACアダプタジャック

オプションの AC アダプタを
接続します

USB コード

パソコンの USB ポートに
接続します

● ACアダプタ [オプション]



夜間などパソコンの電源がオフの時もスイッチ長押しでナースコールが行えるようにします

(接続しない場合パソコンの電源オフの時はスイッチ操作がそのままナースコールへ伝わります)

◆ ナースコール

- スイッチを一定時間(出荷設定約5秒)押したままにするとナースコール出力がオンになります。
- ナースコール出力がオンの間ランプが橙に点灯します。
- ナースコール出力がオンになってすぐスイッチを離しても最低1秒間はオンが続きます。
- ナースコール出力がオンになったあとスイッチを押したままにすると、押し続けている間は出力がオンのままですが、約6秒経過するとオフになります。
- ナースコール出力がオフになると、ランプが緑に変わります。
- ランプが緑の状態ですwitchを押すと、すぐにナースコール出力が再びオンになります。
- ランプが緑の状態はナースコール出力オフの後約3秒間続きます。
- ナースコール出力オフ後約3秒たつとランプが消灯し通常のマウス操作状態に戻ります。
- ナースコール出力はリレー接点(無電圧)で極性はありません。
リレー接点の定格はDC30V1Aです。接続には3.5mmミニプラグの付いたコードをお使い下さい。
- スイッチ長押しによるナースコールは、パソコンの電源オン(Windows が起動した状態)またはオプションの AC アダプタを接続した状態で有効になります。パソコンの電源がオフでACアダプタも接続していない場合(停電の場合も含む)は、スイッチ操作がそのままナースコールへ伝わります。(スイッチを押すとすぐナースコール)

◆ スイッチを押す時間の設定

- スイッチを押したままにしてナースコール出力オンになるまでの時間は設定ソフトの「左ボタンロック」の項目で変更できます。
- 設定時間は「1:なし」13秒、「2:長」8秒、「3:中」5秒(出荷設定)、「4:短」3秒です。