

1. スピード変更

- 設定ソフトを使用せずスイッチ操作でカーソルスピードを変えられます。
- スイッチを「---」（長長短長）と続けて押すと、カーソル移動スピードが一段階速くなります。
- 同じ操作を行うごとにスピードが速くなっていきます。
- スイッチを「- - -」（長短長長）と続けて押すと、カーソル移動スピードが一段階遅くなります。
- 同じ操作を行うごとにスピードが遅くなっていきます。
- 一段階あたりのスピードの変化量が設定ソフトより小さいため、細かいスピード設定ができます。
- 設定したスピードは記憶され次回の起動時に変更後のスピードで動作します。
- 設定ソフトでカーソル移動スピードを変えると、上記変更は解除され、設定ソフトによるスピードで動作します。

2. 長押しリピート

- スイッチを長く押す操作を8回続けて行うと、長押しリピートに設定されます。
- 長押しリピートに設定すると、たとえばスイッチを長く押す操作を3回繰り返す場合、スイッチを3回分の時間押したままにすることで同じ操作ができます。
- スイッチを押したままにすると一定間隔でブザーが鳴ります。ブザーが3回鳴ったときにスイッチを離すと、スイッチを長く押す操作3回と同じ操作になります。
- 長押しリピートでは1回の長押しで5回までのスイッチを長く押す操作ができます。
- 長押しリピートに設定していても長押しではなく長く押す操作の繰り返しも可能です。
- 長押しリピート設定はワンキー・マウス内に記憶され次回の起動時も同設定で動作します。
- 長押しリピートに設定された状態でスイッチを長く押す操作を8回続けて行うと、長押しリピートは解除されます。

3. スクロールホイール

- スイッチを「- - -」（長短長）と押すとマウスのスクロールホイールを手前に回す操作となり、画面が下へスクロールします。（文書が上に流れ下の方が見えるようになる）
- スイッチを「- - -」（長短長短）と続けて押すと、マウスのスクロールホイールを奥に回す操作となり、画面が上へスクロールします。（文書が下に流れ上の方が見えるようになる）
- スクロール量は「コントロールパネル」(Windows)、「システム環境設定」(Mac OS)の「マウス」で調節できます。
- Windows では「- - - -」（長4回）によるスクロールボタン操作でのスクロールも可能です。

4. Mac 用設定

- スイッチを「- - - - - -」（長7短1）と続けて押すと、Mac OS での使用に適した設定に変わります。
- Mac 用設定にすると以下の点が変わります。
 - ① 同じスピード設定にしたときカーソル移動スピードが速くなります。
 - ② スピード設定を変えたとき変化量が小さくなります。
 - ③ 通常スピードと低速移動スピードの比が小さくなります。
 - ④ スクロールホイール操作時のスクロール量が大きくなります。
 - ⑤ 設定ソフト操作時の動作が安定します。
- Mac 用設定にせず Mac OS で使用することも Mac 用設定で Windows を使用することも可能です。
- Mac 用設定はワンキー・マウス内に記憶され次回の起動時も同設定で動作します。
- Mac 用に設定された状態で「- - - - - -」とスイッチを押すと設定は解除されます。

◆ スイッチ操作一覧

・: スイッチを短く押す –: スイッチを長く押す *: 設定ソフトで変更可能

スイッチ操作	カーソル停止時	カーソル移動中	備考
・	右*へ移動開始	右*へ曲がる	
—	クリック	停止、ドロップ	
— —	ダブルクリック*		
— — —	右クリック*		
— ・	ドラッグ 右*へ移動開始		クリック+右移動
・ —	低速で右*へ移動開始	速度切り換え	
・ ・	下*へ移動開始	Uターン	右折2回
・ ・ ・	左*へ移動開始	左*へ曲がる	右折3回
・ ・ ・ ・	上*へ移動開始		
— — — ・	右ドラッグ* 右*へ移動開始		右クリック+右移動
— — — —	中(スクロール)ボタン*		Windows のみ
— ・ —	上へスクロール		ホイール
— ・ ・	下へスクロール		ホイール
— — — —	スピードアップ		
— ・ — —	スピードダウン		
— — — — —	第2の設定へ切り換え		
— — — — —	設定ソフト操作		
— — — — — ・	Mac 用設定		
— — — — — —	長押しリピート		

ワンショット操作

スイッチ操作	カーソル停止時	カーソル移動中	備考
・	カーソル移動開始	移動方向切換	通常動作と同じ
・ ・	左クリック	停止、 ドロップ(ドラッグ中)	長1回「—」と同じ
・ ・ ・	右クリック	速度切換	速度切換は移動中のみ可能
・ ・ ・ ・	左ダブルクリック (短2回の2回繰り返し)	移動方向反転 (左←→右、上←→下)	
・ ・ ・ ・ ・	ドラッグで移動開始	ドラッグ(移動中) ドロップ(ドラッグ中)	
—	左クリック	カーソル停止	短2回「・ ・」と同じ
— — — — —	設定ソフト操作	なし	