

ワンキー・マウスワイヤレス[左ボタン機能付き]説明書

Rev.8.2

ワンキー・マウスのワイヤレス機能左ボタン機能と出力切換機能について説明します。
マウス機能については操作ガイドおよび CD-ROM 内の取扱説明をご覧ください。

◆ 各部の名称と機能

送信機 正面




送信面



内部



受信機 (ワンキー・マウス)

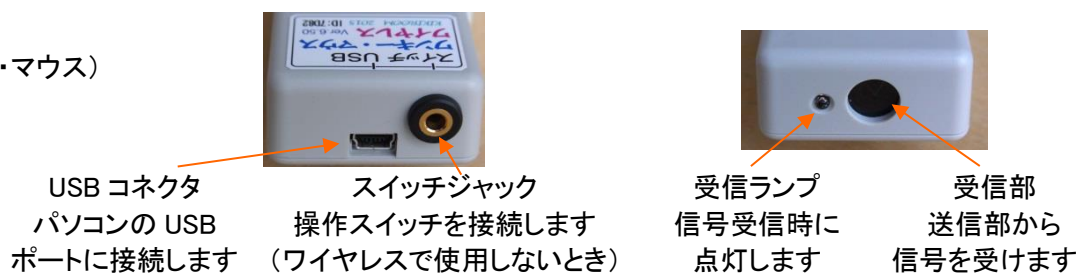

◆ 準備

1. 送信機のスイッチジャックに操作スイッチを接続してください。

スイッチは付属しません

2. ワンキー・マウスのUSBコネクタにUSBコードを差し込み、パソコンのUSBポートに接続してください。
3. 送信機の出力ジャックと Bluetooth ワンキー・マウスのスイッチジャック間を接続コードでつないで下さい。



4. 必要に応じて、送信機のラップジャックに外付けランプを接続してください。
5. 送信機の送信部とワンキー・マウスの受信部が向き合うように置いてください。
(正面に向き合わせたとき 10m 程度届きますが実用的には少しずれても動作する 3m 以内で使用してください)
6. ワイヤレス機能を使用しない場合はワンキー・マウスのスイッチジャックに直接操作スイッチを接続して使用できます。
(左ボタン機能は直接接続したスイッチでは操作できません)



◆ 使い方

1. 操作スイッチをオンにすると送信機の出カランプが点灯します。
2. 出カランプは、出力先が赤外線の場合は赤、出カジャックへの出力 (Bluetooth ワンキー・マウス) のときは緑、左ボタン機能のときは橙で点灯します。
3. 出力先が赤外線の場合、ワンキー・マウスの受信ランプが点灯し、マウス操作が行われます。
4. 出カジャックへの出力の場合、Bluetooth ワンキー・マウスの操作が行われます。
5. 左ボタン機能の場合は、ワンキー・マウスを経由して左ボタン操作が行われます。
6. 外付けランプは送信機の出カランプと同時に点灯／消灯します。出カランプが橙で点灯するとき、外付けランプは赤と緑の両方が点灯します。

◆ 出力先切換

7. 出力先の切換は、スイッチの長押しで行います。
8. 設定した時間スイッチをオンのままにすると、出カランプが新しい出力先の色に変わり、出力先が切りかわります。
9. 出力先は赤外線→出カジャック→左ボタン→赤外線... の順に切りかわります。
10. 出力先が切りかわった後もスイッチをオンのままにしていると、次の出力先に切りかわります。
11. 出力先が切りかわると、スイッチの信号はスイッチをオフにするまでどの出力先へも送られません。
12. 新しい出力先へのスイッチ信号出力は、次にスイッチをオンにしたときからはじまります。

◆ 左ボタン機能

13. 左ボタン機能では、スイッチのオン／オフがそのままマウスの左ボタンオン／オフになります。
14. スwitchを設定した時間オンのままにすると、左ボタンロックとなりスイッチをオフにしても左ボタンが押された状態が維持されます。
15. 左ボタンロックの状態では出カランプが点灯から点滅に変わります。
16. 左ボタンロックの状態でスイッチを再びオンにすると、ロックが解除され、スイッチをオフにした時点で左ボタンがオフになります。
17. 左ボタンロックのまま約 12 分間スイッチ操作が行われないと、ロックが自動的に解除されます。
(電池の消耗を防ぐためです)

◆ 長押し時間設定

- 出力先を切り換えるためのスイッチ長押し時間を設定します。
- 左ボタンロックのための長押し時間も連動して変化します。
- 送信機のふたを開け、設定ボタンを押して下さい。
- 設定ボタンを押すと、現在の設定内容が出力ランプの色と点滅回数で表示されます。

長押し時間

ランプ		出力先切換	左ボタンロック
●	赤点灯 1 回	1 秒	0.5 秒
●●	赤点滅 2 回	2 秒	0.6 秒
●●●	赤点滅 3 回	3 秒	0.8 秒
●●●●	赤点滅 4 回	4 秒	1.0 秒
●	緑点灯 1 回	5 秒	1.4 秒
●●	緑点滅 2 回	6 秒	1.8 秒
●●●	緑点滅 3 回	7 秒	2.2 秒
●●●●	緑点滅 4 回	8 秒	3.0 秒



設定ボタン

- 設定ボタンをすぐにはなすと、設定は変更されません。(現在の設定の確認のみ)
- 設定ボタンを 1.3 秒押したままにすると、設定が次のものになり、新しい設定内容が出力ランプの色と点滅回数で表示されます。
- 設定ボタンを押したままにしていると、約 1.3 ごとに設定が順に変わります。
- 希望の設定になったときに設定ボタンをはなすと、その内容が登録されます。

◆ 前バージョンとの違い（追加機能以外の変更点）

- 切替方法は長押しのみで、連打による切り換えはできません。
- 連打切替廃止により、切替操作を前のスイッチ操作から 0.6 秒時間をあける必要がなくなりました。
- 出力先の切替動作中は、どの出力先へもスイッチの信号が送られません。
(前バージョンでは切りかわる前の出力先へスイッチの信号が送られます)
- 出力先が切りかわった時、ランプは新しい出力先の色で点灯します。
(前バージョンでは切替動作中紫で点灯します)
- ランプの色が青→緑、紫→橙(赤緑両点灯)に変更されています。
- ID番号が同じであれば、前バージョンのワンキー・マウス(受信機)も操作できますが、左ボタン機能を利用するには受信機の改修が必要です。