

ワンキー・マウス ナースコール・外部操作機能説明書

Rev.6.08

- ◆ ナースコール機能と外部操作機能付きワンキー・マウスのナースコール機能と外部操作(1スイッチリモコン操作)機能について説明します。
- ◆ マウス機能については操作ガイドを参照してください。



◆ 各部の名称と機能

● 前面



● 背面



◆ 使い方 外部機器として1スイッチリモコンを接続した場合

● マウス操作

1. マウスの操作は通常のワンキー・マウスと同じです。マウス操作中リモコンは動作しません。

● 外部機器操作

2. マウス操作中スイッチを 2.34 秒(出荷時設定)押したままにするとブザーが2回鳴り、ランプが青く点灯します。点灯後スイッチを放すとリモコン操作に切りかわります。
3. リモコン操作中はスイッチ操作がそのまま1スイッチリモコンに伝わります。操作方法は1スイッチリモコンを単体で使用するときと同じです。
4. リモコン操作中マウスは動作しません。
5. リモコン操作中スイッチを 2.34 秒押したままにするとブザーが鳴り、ランプが消灯します。消灯後スイッチを放すとマウス操作に切りかわります。
6. リモコン操作からマウス操作に戻るためのスイッチ操作のときに不要なリモコン操作が行われます。これを避けるには、リモコンが「長押しあり」(出荷時設定)のときは1度短くスイッチをオンにした後続けて長押ししてください(「**・ー**」と押す)。「長押しなし」の場合は短く10回押した後長押ししてください。

● ナースコール

7. マウス操作中スイッチを 2.34 秒押したままにするとブザーが2回鳴り、ランプが青く点灯します。点灯後もそのままさらに2.34秒間押したままにすると(合計4.7秒)、ブザーが3回鳴り、ランプが赤く点灯してナースコール出力がオンになります。

8. ナースコール操作後 2.34 秒間ランプが青色に点灯します。ランプが青で点灯中にスイッチを押すと、即座にナースコールがオンになります。
9. スイッチを放したまま 2.34 秒経過するとランプが消灯しマウス操作に戻ります。
10. リモコン操作中の場合、スイッチを 2.34 秒押したままにするとブザーが鳴り、ランプが消灯します。点灯後もそのままさらに 2.34 秒間押したままにすると(合計 4.7 秒)、ブザーが3回鳴り、ランプが赤く点灯してナースコール出力がオンになります。
11. リモコン操作中にナースコール操作を行った場合、ナースコール後はリモコン操作ではなくマウス操作に戻ります。
12. 停電時はスイッチを押すと即座にナースコールがオンになります。

◆ 長押し時間の設定

1. マウス操作と外部機器操作を切り換えるためのスイッチ長押し時間時間は、設定ソフトの「長／短切り分け時間」と「左ボタンロック」の項目で設定します。
2. 「長／短切り分け時間」は、マウス操作時にスイッチの長押しと判定されるまでの時間を実際に使いやすい時間に設定し、その何倍の時間スイッチを押したままにしたときに外部機器操作に切り換えるかを「左ボタンロック」の項目で選択します。
3. 倍数は「左ボタンロック」の設定値が「1:なし」の時25倍、「2:長」15倍、「3:中」9倍(出荷設定)、「4:短」6倍です。
4. 設定ソフトの「長／短切り分け時間」の設定値が4(出荷時)の場合「左ボタンロック」の設定値に対応する時間は、「1:なし」13秒、「2:長」7.8秒、「3:中」4.7秒(出荷設定)、「4:短」3.1秒です。
5. 「長／短切り分け時間」と「左ボタンロック」の設定値ごとの設定時間は以下の通りです。[秒]

長／短切り分け時間		左ボタンロック				
		設定値	1	2	3	4
設定値	時間[秒]	倍数	25	15	9	6
1	1.74	43.5	26.1	15.7	10.4	
2	1.16	29.0	17.4	10.4	7.0	
3	0.78	19.5	11.7	7.0	4.7	
4	0.52	13.0	7.8	4.7	3.1	
5	0.34	8.5	5.1	3.1	2.0	
6	0.22	5.5	3.3	2.0	1.3	
7	0.16	4.0	2.4	1.4	1.0	
8	0.12	3.0	1.8	1.1	0.7	

6. ケータイ打ち(左ボタン連続操作)機能を「あり」に設定すると、上の表より 2.34 秒時間が長くなります。(出荷時設定は「なし」)
7. ケータイ打ち機能を「あり」に設定すると、外部機器操作に切りかわる前にいちど左クリック動作が行われます。
8. ケータイ打ち機能を利用したいときは、スイッチを押し始めて 2.34 秒経ったらいちどスイッチを放してください。