

スイッチアダプタ説明書


◆ 概要

- スwitchアダプタは、スイッチを操作したときにパソコンに特定のキー／マウスボタン入力を行う装置です。
- パソコンのUSBポートに接続し、操作スイッチをつないでPeteなどのパソコン入力補助ソフトの操作に用います。
- パソコンに入力されるキー／マウスボタン信号は選択できます。



◆ 接続方法

- 「スイッチ」ジャックに操作スイッチを接続してください。
- Windows が完全に起動した状態でパソコンのUSBポートにスイッチアダプタのUSBコネクタをさしこんでください。
- 「新しいハードウェアが見つかりました」という表示が現れます。
- 表示は自動的に数回切り替わり、最後に「新しいハードウェアがインストールされ、使用準備ができました。」と表示されれば接続完了です。

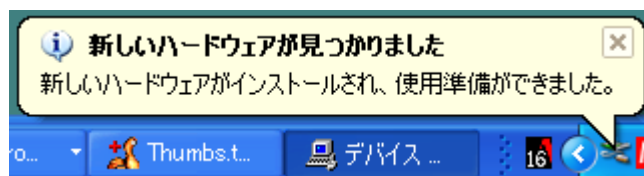

◆ 使用方法

- 操作スイッチをオンにするとパソコンにキー／マウスボタン信号が送られ、Peteなどを操作できます。

◆ キー変更方法

- スwitchを操作したときにパソコンへ送られるキー／マウスボタン信号を変更できます。
- ケース底面にある設定ダイヤルで2桁の数字を設定します。

◆ マウス操作	ダイヤル	備考
左ボタン	01	クリック
右ボタン	02	クリック
中ボタン	03	クリック
左右同時押し	04	クリック
スクロール上	05	クリック
スクロール下	06	クリック
左ダブルクリック	07	スイッチを早く離すとシングルクリック
左ボタン長押し	08	スイッチを押している間オン
右ボタン長押し	09	スイッチを押している間オン
中ボタン長押し	0A	スイッチを押している間オン
左右同時長押し	0B	スイッチを押している間オン
ワンキーマウス	00	要リセット(USBコネクタを抜き差し)

◆ シフトキー					備考
	ダイヤル		ダイヤル		
Ctrl 左	10	Ctrl 右	13		
Shift 左	11	Shift 右	14		
Alt 左	12	Alt 右	15		
GUI(Window) 左	3C	GUI(Window) 右	3D		
Ctrl 左 リpeat	16	Ctrl 右 リpeat	19	スイッチオンの間連続入力	
Shift 左 リpeat	17	Shift 右 リpeat	1A	スイッチオンの間連続入力	
Alt 左 リpeat	18	Alt 右 リpeat	1B	スイッチオンの間連続入力	

◆ 特殊キー				
	ダイヤル		ダイヤル	ダイヤル
Enter	1C	Home		26
Esc	1D	End		27
Tab	1E	Page Up		28
Space	1F	Page Down		29
Caps Lock	3E	Print Screen		2A
↑	20	Scroll Lock		2B
→	21	Pause		2C
↓	22	Back Space		2D
←	23	Menu		2E
Ins	24	漢字		2F
Del	25	無変換		0D
		変換		0E
		カタカナ		0F

◆ 文字／記号						
	ダイヤル		ダイヤル		ダイヤル	ダイヤル
0	50	G	60	W		70
1	51	H	61	X		71
2	52	I	62	Y		72
3	53	J	63	Z		73
4	54	K	64	[74
5	55	L	65	¥		75
6	56	M	66]		76
7	57	N	67	^		77
8	58	O	68	-		78
9	59	P	69	@		79
A	5A	Q	6A	+		7A
B	5B	R	6B	*		7B
C	5C	S	6C	<		7C
D	5D	T	6D	>		7D
E	5E	U	6E	?		7E
F	5F	V	6F	ろ		7F

◆ ファンクションキー	ダイヤル	◆ テンキーパッド	ダイヤル
F1	30	Num Lock	3F
F2	31	0 Ins	40
F3	32	1 End	41
F4	33	2 ↓	42
F5	34	3 PgDn	43
F6	35	4 ←	44
F7	36	5	45
F8	37	6 →	46
F9	38	7 Home	47
F10	39	8 ↑	48
F11	3A	9 PgUp	49
F12	3B	/	4A
		*	4B
		—	4C
		+	4D
		Enter	4E
		. Del	4F

◆ Mac	ダイヤル	備考
英数	81	
カナ	80	
F13	83	
F14	84	
F15	85	
テンキー =	82	
テンキー 、	86	
Help	24	Ins
Clear	3F	Num Lock
Command 左	3C	GUI
Command 右	3D	GUI